

## Hörgeräte-Batterien

In den HÖRFREUDE Fachgeschäften erhalten Sie ausschließlich hochwertige Hörgeräte-Batterien namhafter Hersteller mit einem vorteilhaften Preis-Leistungsverhältnis. Wir garantieren Ihnen, dass unsere Hörgeräte-Batterien die längste Tragezeit und höchste Qualität besitzen.

### Wissenswertes zu Hörgeräte-Batterien:

- ✓ Heutzutage werden ausschließlich Zink-Luft-Zellen verwendet. Früher erhältliche Quecksilberbatterien waren umweltschädlich und nur über eine wesentlich geringere Kapazität verfügten.
- ✓ Moderne Hörgeräte-Batterien sind mit einem Siegel versehen. Wird das Siegel entfernt, strömt Luft durch die kleinen Öffnungen am Gehäuse. Die Chemikalien reagieren und sorgen für eine Spannung, die das Gerät mit Energie versorgt.
- ✓ Hörgeräte-Batterien gibt es in vier verschiedenen Größen mit den Nummern: **675, 13, 312 und 10.**  
Da jedes Hörgerät nur einen bestimmten Typ aufnehmen kann, sind die Packungen meist farblich gekennzeichnet.  
675er Zellen sind blau markiert, 13er sind orange markiert, 312er sind braun markiert und 10er Hörgeräte-Batterien haben eine gelbe Markierung.

Sparfüchse kaufen Hörgerätebatterien heutzutage in Apotheken oder im Internet, insbesondere bei billigen Angeboten aus nichteuropäischer Produktion sind häufig Abstriche bei der Qualität zu verzeichnen. Dabei kann es passieren, dass falsche Batterien gekauft werden, da die fachliche Beratung fehlt. Dann kann es dazu kommen, dass die Hörgeräte-Batterie entweder nicht in die Batterielade passt oder zu klein ist und damit keine optimale Verbindung zu den Kontakten herstellen kann. Die Funktion des Geräts ist dann nicht gewährleistet, es geht dann entweder nicht an oder es geht ständig an und aus. Wir achten beim Kauf in unseren Fachgeschäften selbstverständlich darauf, dass unsere Kunden zur richtigen Packung greifen.

### Wie lange halten Hörgeräte-Batterien?

Die Haltbarkeit einer Hörgeräte-Batterie im Einsatz ist von verschiedenen Faktoren abhängig:

- Geräte-Typ
- Tragedauer
- Umgebungsgeräuschen
- Kapazität
- und weiteres

Der Erfahrung nach halten die Hörgeräte-Batterien bei täglicher 8 stündiger Tragedauer wie folgt:

- 10er ca. 8 Tage      - 312er ca. 12 Tage
- 13er ca. 20 Tage    - 675er ca. 25 Tage



HÖRFREUDE® - Das Familienunternehmen aus Sachsen-Anhalt mit 25 Jahren Erfahrung!

#### Staßfurt

Zollstraße 12  
Tel.: 03925 - 30 25 52

#### Oschersleben

Halberstädter Str. 33  
Tel.: 03949 - 98 651

#### 2 x in Dessau-Roßlau

Zerbster Str. 14 u. Franzstr. 85  
Tel.: 0340 - 850 71 50    Tel.: 0340 - 217 131 80

#### 2 x in Magdeburg

Breiter Weg 189 u. Lübecker Str. 107/108  
Tel.: 0391 - 55 74 99 44    Tel.: 0391 - 53 58 89 66

HÖRFREUDE® Verwaltung, Prinzenberg 12, 39418 Staßfurt

Tel: 03925-2892113; Email: [service@hoerfreude.info](mailto:service@hoerfreude.info); [www.hoerfreude.de](http://www.hoerfreude.de); Umsatzsteuer ID: DE 139514108

Hörgeräte-Batterien sind zwar sehr lange, aber auch nur begrenzt haltbar. Nach der Produktion werden die verwendeten Chemikalien immer reaktionsträger. Nach einer gewissen Zeit bringen sie dann nicht mehr die vollständige Leistung. Bei der HÖRFREUDE erhalten Sie stets frische Zellen, die auch in 3 Jahren noch die volle Leistung aufweisen. Aus diesem Grund kaufen wir keine großen Mengen ein, über die man sich zwar einen guten Einkaufspreis sichern könnte, die Qualität allerdings nicht gewährleistet ist. Bitte lagern Sie die Ihre Hörgeräte-Batterien zu Hause kühl und trocken – jedoch nicht im Kühlschrank.

Bei der Auswahl passender Hörgeräte sollte der verwendete Batterietyp jedoch eher eine nachgeordnete Rolle spielen. Tatsächlich bewegen sich die „Stromkosten“ für ein Hörgerät pro Tag im Cent-Bereich (siehe unten). Achten Sie vielmehr darauf, dass Ihnen Design, Größe und Hörkomfort des Hörgerätes zusagen. Wir beraten Sie gerne.

### Tipps zum Kauf von Hörgeräte-Batterien:

- ✓ Achten Sie auf die CE Kennzeichnung!  
In der EU gibt es für die industrielle Produktion vielfältige Richtlinien, die gewährleisten, dass ein Produkt immer in derselben Qualität, Größe, Haltbarkeit und Form sowie in der richtigen Abmessung gefertigt wird. Bei der HÖRFREUDE erhalten Sie nur hochwertige Produkte mit CE Kennzeichnung.
- ✓ Kaufen Sie keine überlagerten Zellen: Überlagerte Zellen erkennen Sie daran, dass nach dem Abziehen der Schutzfolie die Batterie bereits ausgelaufen ist.



- ✓ Kaufen Sie nur Batterien mit europäischer Herkunft



Hier sehen Sie eine Batterie nichteuropäischer Herkunft. Meist sind die Abmessungen nicht eingehalten, damit weist das Hörgerät den "An-Aus-Effekt" auf. Diese Quecksilberbatterie darf in Deutschland nicht für Hörgeräte verkauft und verwendet werden.



HÖRFREUDE<sup>®</sup> - Das Familienunternehmen aus Sachsen-Anhalt mit 25 Jahren Erfahrung!

#### Staßfurt

Zollstraße 12  
Tel.: 03925 - 30 25 52

#### Oschersleben

Halberstädter Str. 33  
Tel.: 03949 - 98 651

#### 2 x in Dessau-Roßlau

Zerbster Str. 14 u. Franzstr. 85  
Tel.: 0340 - 850 71 50    Tel.: 0340 - 217 131 80

#### 2 x in Magdeburg

Breiter Weg 189 u. Lübecker Str. 107/108  
Tel.: 0391 - 55 74 99 44    Tel.: 0391 - 53 58 89 66

HÖRFREUDE<sup>®</sup> Verwaltung, Prinzenberg 12, 39418 Staßfurt

Tel: 03925-2892113; Email: [service@hoerfreude.info](mailto:service@hoerfreude.info); [www.hoerfreude.de](http://www.hoerfreude.de); Umsatzsteuer ID: DE 139514108

- ✓ Kaufen Sie keine billigen Hörgeräte-Batterien ohne CE-Kennzeichen



Auf dieser Verpackung befindet sich kein CE-Kennzeichen, es handelt es sich um billige Hörgeräte-Batterien. Man erfährt nicht, ob und wie lange bei diesen Zellen überhaupt eine ausreichende Funktion gewährleistet wird.

- ✓ Beim Kauf einer Packung Hörgeräte-Batterien erkennen Sie auf der Rückseite folgendes:



Auf dieser Verpackung von hochwertigen Hörgeräte-Batterien haben wir für Sie die wichtigen Merkmale markiert:

1. Haltbarkeit
2. CE-Kennzeichnung
3. Chargennummer (regelmäßige Qualitätskontrolle)

- ✓ Ihre leeren Hörgeräte-Batterien nehmen wir gern zurück und entsorgen Sie fachgerecht.

## Der Preis von Hörgeräte-Batterien

Hochwertige Batterien erhalten Sie bei der **HÖRFREUDE** schon ab 50 Cent je Stück. Bei der bis zu 25 tägigen Haltedauer einer 675er Zelle bedeutet dies, dass die Stromversorgung Ihres Hörgerätes rund 2 Cent pro Tag kostet. Angesichts der geringen Kosten für die Stromversorgung eines Komfort-Hörgerätes sollte daher nicht an der Qualität der Batterie gespart werden. Wir möchten Ihnen nochmals dringend von billigen Angeboten nichteuropäischer Herkunft ohne CE Kennzeichnung abraten. Mit hochwertigen Hörgeräten tun Sie sich etwas Gutes, tun Sie für Ihre Hörgeräte und die lange unbeschwerte Lebensdauer auch etwas Gutes und berücksichtigen Sie unsere Tipps. Unsere preiswerten aber hochwertigen Hörgeräte-Batterien erhalten Sie natürlich auch im praktischen **Spar-Paket – 60 Stück für nur 26,90 €**. Das Depot hält mehrere Monate, auch bei beidseitigem Tragen von Hörgeräten. Über diese Dauer müssen Sie keinen Qualitätsverlust der Batterien befürchten. Gerne bieten wir Ihnen auch unsere Premium-Hörgeräte-Batterien an. Gerne bieten wir Ihnen auch unsere Premium-Hörgeräte-Batterien im Spar-Paket an. Fragen Sie einfach unsere **HÖRFREUDE-Akustiker**.



**HÖRFREUDE® - Das Familienunternehmen aus Sachsen-Anhalt mit 25 Jahren Erfahrung!**

### Staßfurt

Zollstraße 12  
Tel.: 03925 - 30 25 52

### Oschersleben

Halberstädter Str. 33  
Tel.: 03949 - 98 651

### 2 x in Dessau-Roßlau

Zerbster Str. 14 u. Franzstr. 85  
Tel.: 0340 - 850 71 50 Tel.: 0340 - 217 131 80

### 2 x in Magdeburg

Breiter Weg 189 u. Lübecker Str. 107/108  
Tel.: 0391 - 55 74 99 44 Tel.: 0391 - 53 58 89 66

HÖRFREUDE® Verwaltung, Prinzenberg 12, 39418 Staßfurt

Tel: 03925-2892113; Email: [service@hoerfreude.info](mailto:service@hoerfreude.info); [www.hoerfreude.de](http://www.hoerfreude.de); Umsatzsteuer ID: DE 139514108